


1
Sortir le tube test du ballon.




2
Enfoncer les 2 extrémités du test en appuyant fortement.




3
Souffler dans l'embout pour gonfler complètement le ballon en une seule fois.

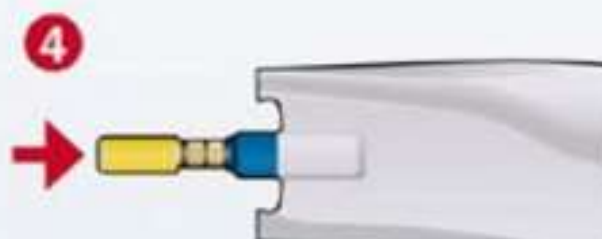

4
Insérer le tube de réactif (côté bleu) dans l'embout bleu.

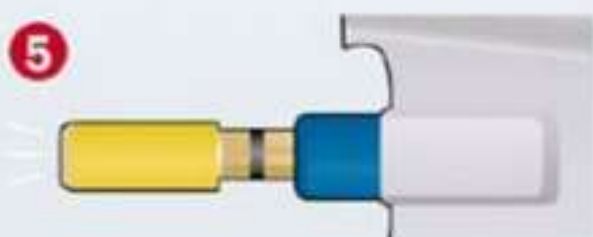

5
Presser le ballon pour le vider lentement et entièrement.

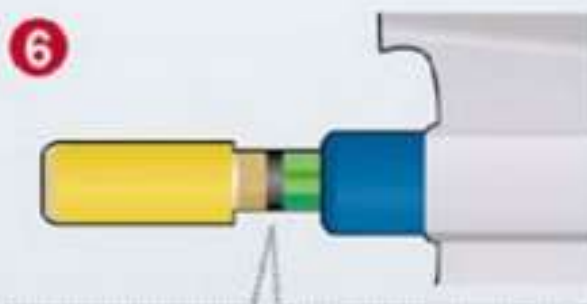

6
Attendre 2 mn pour le résultat.

Si les cristaux sont **jaunes** : pas d'alcool, test négatif.

Si **vert** : il y a de l'alcool. Si le vert atteint ou dépasse le trait central, le test est positif. Le taux d'alcoolémie est égal ou supérieur à 0,5 g/l dans le sang. On ne doit pas conduire.

Attention :
Le taux d'alcoolémie maximum est atteint au moins 30 mn à 1 h après le dernier verre d'alcool.